

Un système **DUAL EXPERT** de RF fractionnée **bipolaire** par **micro-needling**

(Développé aux USA - Sécurité et Efficacité confirmées par de nombreuses études cliniques).

SYLFIRM X délivre à la fois :

- > **DES PULSES RF CONTINUS (CW)**
- > **ET DES PULSES RF RÉPÉTÉS ULTRA-COURTS (PW)**

Les aiguilles non-isolées produites par un robot de grande précision permettent un réglage précis de la profondeur de traitement et induisent un large champ électromagnétique, qui optimise spécifiquement les résultats des traitements du mélasma, de la rosacée et de l'Hyperpigmentation Post-inflammatoire.

Grâce à la technologie SR3-RP (Selective Regional Regeneration Radio Repeated Pulses), l'énergie RF hyper-pulsée détruit les vaisseaux anormaux, renforce la membrane basale et régénère le collagène. Il en résulte une réjuvenation globale de la peau.



Indications :

- Remise en tension de la peau du visage et du corps
- Acné et cicatrices d'acné
- Rides et ridules du visage et du cou
- Pores dilatés
- Mélasma
- Hyperpigmentation post-inflammatoire
- Rosacée
- Cicatrices
- Vergetures

Avantages :


- Traitements courts et peu invasifs
- Non douloureux
- Sans éviction sociale
- Sans effets secondaires
- Avec d'excellents résultats

CE medical

PULSES RF CONTINUS (CW)


Pour des traitements par RF en toute sécurité

SYLFIRM X est un appareil de RF fractionnée innovant, qui par ses pulses de longueur modulable permet d'obtenir un raffermisssement cutané sans douleur, ni éviction sociale, quelque soit le phototype de la peau ou la saison.



Pulse long unique

Electrodes insérées dans le derme



Pulse RF court : 55-60°C


L'énergie est délivrée dans le derme à la profondeur prescrite

| | |
|------------|--|
| CW1 | |
| CW2 | |
| CW3 | |
| CW4 | |

PULSES RF RÉPÉTÉS ULTRA-COURTS (PW)


Pour un effet Hyper-Pulse précis et puissant

SYLFIRM X émet des pulses courts répétés ciblant spécifiquement les vaisseaux sanguins anormaux, remodelant la membrane basale et régénérant le collagène dermique. Ce traitement améliore nettement la rougeur, les vaisseaux, l'HPI et le mélasma.

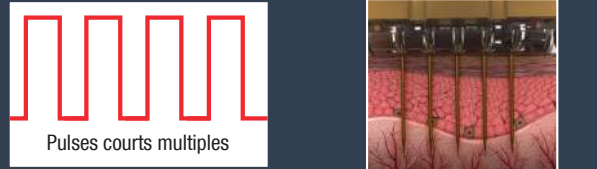

Pulses courts multiples

Electrodes insérées dans le derme

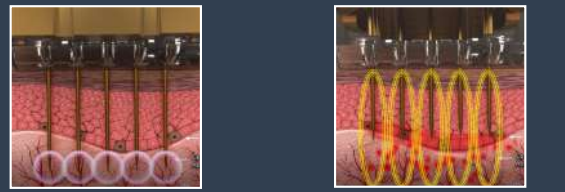


Pulses RF ultra-courts répétés : 50-55°C

L'énergie est délivrée à la membrane basale et aux vaisseaux anormaux


| | |
|------------|--|
| PW1 | |
| PW2 | |
| PW3 | |
| PW4 | |

Des têtes adaptées à chaque traitement

NEW



TIP Original A Tip 5*5(25pin), 2.0mm B Tip 5*5(25pin), 1.5mm C Tip 3*6(18pin), 1.5mm



DES TETES ADAPTEES A CHAQUE TRAITEMENT

PROFONDEURS CIBLÉES :

| | |
|--------------------------|-----------|
| Épiderme | 0.3-0.5mm |
| Derme superficiel | 0.8-1.2mm |
| Derme moyen | 1.3-2.0mm |
| Derme profond | 2.1-4.0mm |